

GUIDE DE MISE EN SERVICE RAPIDE

AUTOLOG IQ™
SYSTÈME D'AUTOTRANSFUSION

* Avancer, Ensemble



Medtronic
Further, Together *

Lisez le manuel de l'utilisateur du système d'autotransfusion autoLog IQ™ en entier avant d'utiliser ce dernier.

Ce guide de mise en service rapide ne se substitue pas au manuel complet de l'utilisateur.

Il a uniquement pour but d'aider l'opérateur à configurer le système d'autotransfusion autoLog IQ™.

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DU SANG



1.

Fixer le tube réducteur au bas du réservoir de récupération. S'assurer que le tube réducteur soit correctement fixé.



2.

Fermer le clamp sur le tube réducteur avant la fin de la configuration du kit. S'assurer que le clamp soit correctement fermé.



3.1

Placer le réservoir de récupération dans son support. Fixer la tubulure d'aspiration sur le port avec capuchon jaune.



3.2

Raccorder l'autre extrémité de la tubulure d'aspiration à la source d'aspiration régulée.

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DU SANG



4.

Raccorder l'extrémité rectiligne avec capuchon bleu de la tubulure d'aspiration/ d'anticoagulant sur le port avec capuchon bleu ou blanc du réservoir.



5.

Clamper la tubulure d'aspiration/ d'anticoagulant.



6.

Mettre l'appareil en marche en appuyant sur .



7.

Mettre l'aspiration en marche en appuyant sur .

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DU SANG



8.

Le cas échéant, régler les paramètres d'aspiration à l'aide du menu déroulant **Vacuum** (Aspiration) sur l'écran Principal.



9.

Perforer la solution d'anticoagulant. Déclamper la tubulure d'aspiration/ d'anticoagulant.



10.1

Avant de commencer la récupération du sang, amorcer le réservoir de récupération avec approximativement 100 à 200 ml de solution anticoagulante.



10.2

Réduire le débit d'anticoagulant à environ 15 mL de solution pour 100 ml de sang.

WASH KIT SETUP



1.

L'appareil affiche :
Kit absent.
Verrouiller le couvercle
du bol.



2.

Accrocher la solution
saline de lavage à un des
crochets de suspension
inférieur du mât.



3.

Placer le kit de lavage
dans le support situé sur
le côté et retirer son
couvercle.



4.

Retirer la poche de
déchets du kit de lavage.
Vérifier que le robinet de
vidange de la poche de
déchets est fermé.

WASH KIT SETUP



5.

Installer la poche de déchets sur les supports situés sur le côté. Veiller à aligner le port avec les repères situés au sommet de l'appareil.



6.

Retirer la poche de stockage du kit de lavage et la suspendre sur le crochet supérieur du mât. Fermer les clamps sur les 2 tubulures de sortie munies d'un capuchon rouge.



7.

Placer le bol dans la chambre de centrifugation, avec la tubulure de sortie de déchets munie d'un capuchon jaune placée en face de la poche de déchets. Remarque : la tubulure latérale doit être face à la poche de déchets.



8.

Aligner les encoches de la centrifugeuse sur les ouvertures des ailettes du bol de centrifugation. Afin de verrouiller le bol, appuyer dessus et faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

CONFIGURATION DU KIT DE LAVAGE



9.

Insérer le connecteur muni d'un capuchon jaune dans le port d'entrée de la poche de déchets muni d'un capuchon jaune. Vérifier que la tubulure de la poche de déchets ne forme pas de nœuds.

10.

Le message s'affiche : **Placer le kit dans la valve et la pompe. Appuyer sur [play icon] pour reprendre.**


11.1

Placer le connecteur multi-voies dans son encoche. Placer les 3 tubulures du collecteur dans les guides pour tubulure. S'assurer que chacune des tubulures est correctement insérée dans son guide.

11.2

Placer l'unique tubulure du collecteur dans le détecteur d'air. Fermer le couvercle du collecteur. Tourner l'attache du couvercle du collecteur jusqu'à ce que les indicateurs de verrouillage soient alignés.

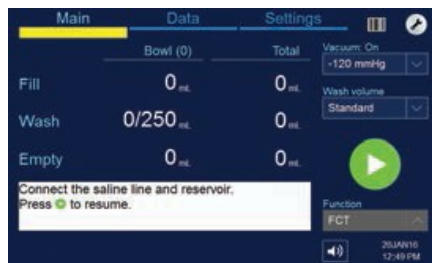

CONFIGURATION DU KIT DE LAVAGE



12.

Tirer le levier de la pompe et le maintenir ouvert. Tendre la tubulure de la pompe autour de la tête de la pompe et par-dessus le guide pour tubulure de sortie de la pompe. Relâcher le levier de la pompe.

13.

Appuyez sur . Le message s'affiche : **Connecter la tubulure de solution saline et le réservoir.** Appuyez sur  pour reprendre.

14.

Perforer la tubulure du collecteur central dans la ou les poches de solution saline. **Connect the saline line and reservoir**
Remarque : si vous utilisez une seule poche de solution saline, vérifiez que le presse-tube de la solution saline non utilisée est fermé.

15.

Brancher la tubulure gauche du collecteur au connecteur muni d'un capuchon bleu au bas du réservoir, puis ouvrir le presse-tube du connecteur.

CONFIGURATION DU KIT DE LAVAGE



1.

Appuyer sur [play icon]. Le message s'affiche : **Machine arrêtée.**
Appuyez sur [play icon] pour autoriser le démarrage automatique.



2.1

Appuyer sur [play icon] pour activer le mode démarrage automatique. Le message s'affiche : **Démarrage automatique autorisé.**
Appuyez sur [play icon] pour démarrer manuellement.



2.2

Le dispositif démarre automatiquement lorsqu'il détecte environ 800 ml de sang dans le réservoir pendant au moins 5 secondes.
Remarque : appuyer sur [play icon] pour commencer le remplissage avant que les 800 ml de sang n'aient été prélevés.

MERCI !

Medtronic
Further, Together

Ne pas distribuer en France

Medtronic

Europe

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tél. : +41 (0)21 802 70 00
Fax : +41 (0)21 802 79 00

Belgique

Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre Etienne
Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
www.medtronic.be
Tél. : +32 (0)2 456 09 00
Fax : +32 (0)2 460 26 67

Suisse

Medtronic (Suisse) SA
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tél. : +41 (0)31 868 01 00
Fax : +41 (0)31 868 01 99

UC201708091FR © Medtronic 2018. Tous droits réservés.
Crédit photo : Medtronic. Réserve aux professionnels de santé.

medtronic.eu